



INSTRUCTIVO DE CAPSULA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO



Se recomienda el uso de:

- Guantes



- Cubre bocas



- Protección ocular



Contenido:


1 capsula

3 popotes de plástico


1 solera de plástico

Procedimiento:

1.-Abrir el empaque y extraer los materiales

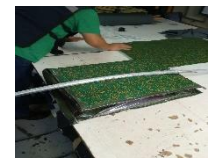


2.- Separar cada una de las partes de la capsula

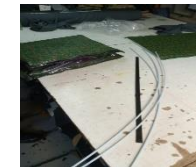

3.- Expandir capsula



4.- Ingresar popote en el arco #1 que se localiza en la parte inicial de la capsula donde estará el cierre

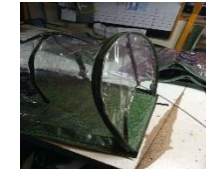

5.- Ingresar popote en el arco #2, este lo ubicara en la parte media de la capsula



PRECAUCIÓN:

No exponer la capsula a temperaturas altas para evitar deformaciones en su estructura.

No colocar objetos sobre la misma para no generar deformaciones.

6.- Ingresar popote en el arco #3 el cual lo hallara en la parte final de la capsula



7.- Para finalizar ingresar solera de plástico en la zona superior central de la capsula



Nota 1: Utilizar un poco de lubricante no toxico para realizar menor esfuerzo al ingresar los plásticos a sus zonas correspondientes. Ejemplo: aceite para bebé.

Nota 2: Al ingresar los plásticos circulares a sus respectivos arcos verificar que únicamente se inserten al orificio correspondiente como lo muestran las siguientes imágenes.



ASIENTOS PRESTIGE & COMFORT S.A DE C.V.

Calle Morelos Mz 2 Lt 4. Colonia: Ejidal El pino
Los Reyes, La Paz.56507 Estado de México

TELÉFONO PRINCIPAL

- 55 1080 8184
- 55 15 51 02 85/ 55 26 13 40 72

vicman@asientosprecom.com.mx

www.asientosprecom.com.mx

www.precomedics.com.mx

